


Une manière simple et rapide de partager vos résultats glycémiques avec votre professionnel de santé

Devenez utilisateur de l'application CONTOUR®DIABETES et connectez-vous à distance avec votre professionnel de santé*

1

Téléchargez
l'application
CONTOUR®
DIABETES

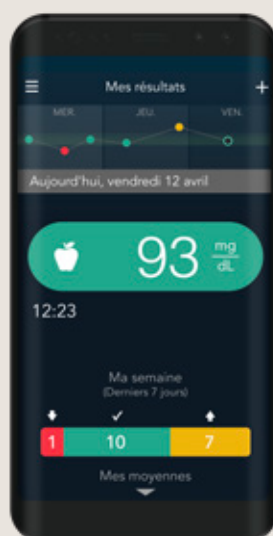

Téléchargement gratuit



Télécharger dans
l'App Store

DISPONIBLE SUR
Google Play

Pour une liste d'appareils compatibles, veuillez visiter compatibility.contourone.com

2

Créez
un compte



3

Connectez votre lecteur
CONTOUR® compatible



Pour plus d'informations visitez:
<https://www.ascensiadiabetescare.be/fr-BE/>

*Les patients doivent être enregistrés sur GlucoContro.online et doivent approuver le partage de leurs données avec leur professionnel de santé

Intégration simple pour permettre l'évaluation à distance de la glycémie avec votre professionnel de santé

Attendez l'invitation de votre professionnel de santé

Invitation par e-mail

ou

Invitation par code QR

Recevez une invitation par e-mail et cliquez sur le lien*



1

Scannez le code QR généré lors de la visite

Ajouter un nouveau patient

Manuel Code QR

Prénom Nom de famille

Je veux envoyer une invitation par e-mail à ce patient

Adresse e-mail

Pays

Information optionnelle

Ajouter un nouveau patient

Ajouter un nouveau patient

Manuel Code QR



2

Connectez-vous avec votre nom d'utilisateur et votre mot de passe de l'application CONTOUR®DIABETES

Patient Professionnel de santé

Contour Pour vous connecter à votre compte, utilisez les informations d'identification Contour Cloud.

Adresse e-mail

Mot de passe [Mot de passe oublié?](#)

Se souvenir de moi

Se connecter Vous n'avez pas de compte ? [Créer un compte](#)

3

Entrez vos informations



Vos données de glycémie seront maintenant disponibles pour votre professionnel de santé via GlucoContro.online

*Le professionnel de santé envoie l'invitation



0800 97 212 (BE)
800 27 254 (LUX)
info@ascensidiabetescare.be
<https://www.ascensidiabetescare.be/fr-BE/>

© 2021 Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Tous droits réservés.

Ascensia, le logo Ascensia Diabetes Care et Contour sont des marques commerciales et/ou des marques déposées par Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Apple et le logo Apple sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. App Store est une marque de service d'Apple Inc. Google Play et le logo Google Play sont des marques commerciales de Google Inc. Toutes les autres marques commerciales appartiennent à leur propriétaire respectif et sont utilisées uniquement à titre informatif.

LMR-ADC-BE-2022006-L-FR