

# Contour next

Système d'autosurveillance glycémique



**NO CODING**  
SANS CODAGE

## MANUEL D'UTILISATION SIMPLIFIÉE

### Le lecteur de glycémie CONTOUR®NEXT



### La bandelette réactive CONTOUR®NEXT

**MISE EN GARDE :** Utiliser uniquement les bandelettes réactives CONTOUR NEXT avec votre lecteur CONTOUR NEXT.

### Allumer et éteindre le lecteur de glycémie

- Appuyer et maintenir enfoncée la touche **OK** pour allumer ou éteindre le lecteur de glycémie.
- L'insertion d'une bandelette réactive dans le port d'insertion allume le lecteur de glycémie.

### Touches de défilement Haut/Bas/OK

- Les touches de défilement ▲ ou ▼ permettent de modifier une par une les valeurs ou les options. Pour faire défiler, il suffit de maintenir la touche ▲ ou ▼ enfoncée.
- Appuyer sur la touche **OK** pour sélectionner l'option en surbrillance.
- Pour quitter le Journal ou les Tendances et revenir au Menu principal, appuyer sur la touche **OK**.
- Pour quitter le mode Configuration et revenir au Menu principal, faire défiler vers le bas jusqu'à **Menu principal** et appuyer sur la touche **OK**.

Lire le Manuel d'utilisation CONTOUR®NEXT ainsi que la notice d'utilisation de l'autopiqueur pour obtenir des instructions complètes. Pour un usage de diagnostic in vitro.

### Configuration initiale du lecteur de glycémie

Il est nécessaire de paramétrer le lecteur de glycémie avant de réaliser le premier test de glycémie.



1. Appuyer et maintenir enfoncée la touche **OK** pour allumer le lecteur de glycémie.



2. Si nécessaire, appuyer sur la touche ▼ pour mettre la langue souhaitée en surbrillance. Faire défiler vers le bas pour visualiser d'autres langues. Appuyer sur la touche **OK** pour valider le choix effectué.

Cette capture d'écran montre comment choisir la langue souhaitée. Leur ordre peut varier en fonction du pays d'origine du lecteur.



3. Un écran confirme la langue sélectionnée.

4. Appuyer sur la touche **OK** pour terminer la configuration. Le lecteur est maintenant prêt à réaliser un test de glycémie.

Il est également possible de changer la langue, l'heure et la date dans le **Menu principal** en sélectionnant **Configuration**. Consulter le Manuel d'utilisation pour obtenir plus d'informations.

### Risques biologiques potentiels

Tous les systèmes d'autosurveillance glycémique présentent des risques biologiques potentiels.

Les professionnels de santé ou les personnes utilisant ce système de surveillance glycémique sur différents patients, doivent respecter les procédures concernant l'hygiène et la prévention des infections, en vigueur dans leur établissement.

Tous les produits ou objets qui ont été en contact avec du sang humain, doivent être considérés et manipulés comme source potentielle de maladies infectieuses, même après nettoyage.

L'utilisateur doit suivre les recommandations de prévention des maladies transmises par le sang dans les services de soins, telles qu'elles sont établies pour les échantillons humains potentiellement infectieux.

Consulter le Manuel d'utilisation pour obtenir des instructions complètes.

Pour obtenir de plus amples informations, consulter le site [www.diabetes.ascensia.com](http://www.diabetes.ascensia.com) ou contacter le Service Clientèle au :  
Tél. 0800 97 212 (BE), Tél. 800 27 254 (LUX)

## Test de glycémie – Prélèvement capillaire sur le bout du doigt


### ⚠ AVERTISSEMENT

Toujours bien se laver les mains à l'eau savonneuse et bien se les sécher avant et après le test, la manipulation du lecteur de glycémie, de l'autopiqueur ou des bandelettes réactives.

1. Retirer l'embase de l'autopiqueur.



2. Tourner d'¼ de tour le capuchon protecteur de la lancette (sans l'enlever).

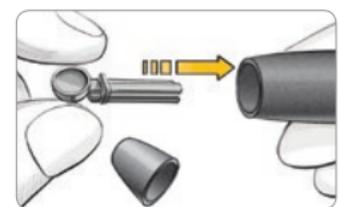


3. Insérer fermement la lancette dans l'autopiqueur jusqu'à ce qu'elle soit complètement bloquée.




4. Enlever le capuchon protecteur de la lancette.



5. Replacer l'embase.

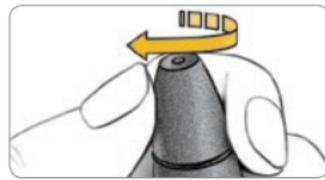

6. Régler la molette pour obtenir la profondeur de prélèvement souhaitée.

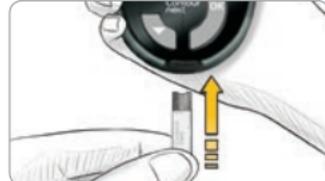


7. Insérer l'extrémité grise de la bandelette réactive dans le port d'insertion et attendre que le lecteur de glycémie s'allume.

Le lecteur de glycémie s'allume et l'écran **Appliquer le sang** apparaît. Le lecteur est maintenant prêt pour réaliser un test de glycémie.



8. Appuyer fermement l'autopiqueur contre le site de prélèvement et appuyer sur la touche de commande.

Masser la main et le doigt aux abords du site de prélèvement pour obtenir une goutte de sang.

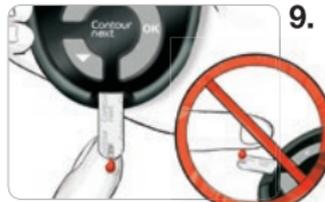

9. Mettre immédiatement l'extrémité de la bandelette réactive en contact avec la goutte de sang.

Si la première goutte de sang n'est pas suffisante, le lecteur de glycémie émet deux signaux sonores. L'utilisateur dispose d'environ 30 secondes pour appliquer davantage de sang sur la même bandelette réactive. Suivre les instructions affichées sur l'écran du lecteur de glycémie.



10. L'écran AutoLog\* s'affiche. Sélectionner **Aucun marqueur, À jeun, Avant repas ou Après repas**, puis appuyer sur la touche **OK**.

Si le résultat est supérieur ou inférieur aux intervalles cibles personnels réglés, le résultat apparaît systématiquement à l'écran sans aucune manipulation nécessaire.



Une fois la sélection réalisée, le résultat du test s'affiche. Le test de glycémie est maintenant terminé et le résultat identifié.

Si le résultat du test est en dehors de l'intervalle cible, il apparaît accompagné d'une annotation et l'écran AutoLog ne s'affiche pas.

11. Pour consulter les Options et ajouter un rappel ou une annotation, appuyer sur la touche **OK** avant de retirer la bandelette réactive.

Consulter le Manuel d'utilisation pour obtenir de plus amples instructions sur l'usage des Options. Pour éteindre le lecteur de glycémie, retirer la bandelette réactive.

\* AutoLog est configuré par défaut sur le lecteur de glycémie. Consulter le Manuel d'utilisation pour obtenir de plus amples informations sur la fonction AutoLog.

Le lecteur est configuré et verrouillé pour afficher les résultats en mg/dL. Si vos résultats s'affichent en mmol/L, contacter le Service Clientèle au : Tél. 0800 97 212 (BE), Tél. 800 27 254 (LUX).

### MISE EN GARDE :

- L'autopiqueur fourni dans le conditionnement n'est pas destiné aux professionnels de santé. Il ne doit pas être utilisé par plus d'une personne afin d'éviter tout risque de contamination.
- Pour retirer la lancette de l'autopiqueur, consulter la notice d'utilisation de l'autopiqueur pour obtenir des instructions détaillées.
- Les dessins représentant l'autopiqueur ne servent que d'illustration.

### Écran Menu principal

1. Le **Journal** est mis en surbrillance. Pour consulter le journal, appuyer sur la touche **OK**.



2. Pour visualiser toutes les moyennes et tous les résumés, appuyer sur la touche **▼** pour mettre **Tendances** en surbrillance, puis appuyer sur la touche **OK**.

3. Pour modifier ou régler le lecteur de glycémie, mettre **Configuration** en surbrillance et appuyer sur la touche **OK**.

Pour obtenir de plus amples informations, consulter le site [www.diabetes.ascensia.com](http://www.diabetes.ascensia.com) ou contacter le Service Clientèle au : Tél. 0800 97 212 (BE), Tél. 800 27 254 (LUX).

**ASCENSIA**  
Diabetes Care

Distribué par :  
Ascensia Diabetes Care NV-SA  
Pegasuslaan 5  
BE-1831 Diegem (Machelen)

Tél. 0800 97 212 (BE)  
Tél. 800 27 254 (LUX)  
info@ascensiadibetescare.be  
[www.ascensiadibetescare.be](http://www.ascensiadibetescare.be)

Ascensia, le logo Ascensia Diabetes Care, Clinilog, Contour, Glucofacts et le logo No Coding (Sans codage) sont des marques de commerce et/ou des marques déposées d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

[www.patents.ascensia.com](http://www.patents.ascensia.com)

Ascensia Diabetes Care Holdings AG  
Peter Merian-Strasse 90  
4052 Basel, Switzerland

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG.  
Tous droits réservés.

**CE**  
2797

90004713  
Rev. 09/19