


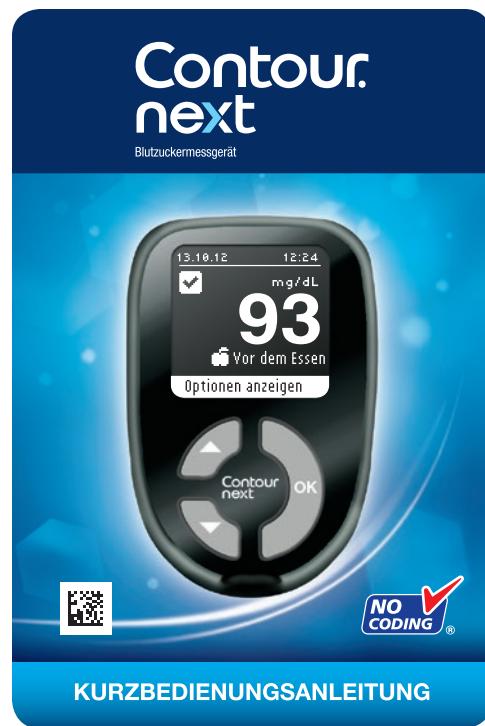

Ihr CONTOUR®NEXT Messgerät



Ihr CONTOUR®NEXT Sensor

VORSICHT: Bitte nur CONTOUR NEXT Sensoren mit dem CONTOUR NEXT Gerät verwenden.

Ein- oder Ausschalten des Messgeräts

- Die **OK**-Taste gedrückt halten, bis sich das **Messgerät ein- bzw. ausschaltet**.
- Das Messgerät wird durch Einführen des Sensors in die Sensoröffnung automatisch eingeschaltet.

Auf-/Abwärts-/OK-Tasten

- Mit der **▲** oder **▼** Taste können die Werte oder Optionen nacheinander angezeigt und geändert werden. Zum Durchlaufen der Werte kann die **▲** oder **▼** Taste gedrückt gehalten werden.
- Die **OK**-Taste drücken, um die markierte Option zu wählen.
- Um Speicher oder Trends zu verlassen und zum Hauptmenü zurückzukehren, die **OK**-Taste drücken.
- Um die Einstellungen zu verlassen und zum Hauptmenü zurückzukehren, ganz nach unten zum **Hauptmenü** scrollen und die **OK**-Taste drücken.

Bitte lesen Sie alle Anweisungen in der Bedienungsanleitung zum CONTOUR®NEXT Messgerät und in der Packungsbeilage zur Stechhilfe. Für die In-Vitro-Diagnostik.

Erstes Einstellen des Messgeräts

Vor der ersten Blutzuckermessung muss das Messgerät eingerichtet werden.




- Halten Sie die **OK**-Taste gedrückt, bis sich das Messgerät einschaltet.



- Falls Sie eine andere Sprache wünschen, drücken Sie die Abwärtstaste **▼**, um die gewünschte Sprache auszuwählen. Blättern Sie für weitere Sprachoptionen nach unten. Drücken Sie die **OK**-Taste, um Ihre Wahl zu bestätigen.

Die Sprachenauswahl ist auf diesem Anzeigebeispiel gezeigt. Die Sprachen können je nach Land in einer anderen Reihenfolge aufgeführt sein.

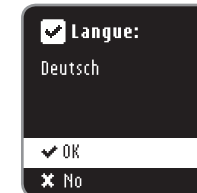


- Ihre Sprachenauswahl wird auf der Anzeige bestätigt.

- Drücken Sie die **OK**-Taste, um die **Einstellung zu beenden**. Damit ist Ihr Messgerät für die Blutzuckermessung bereit.

Sprache, Zeit und Datum können jederzeit im **Hauptmenü** unter **Einstellung** geändert werden. Bitte lesen Sie die Anweisungen in der Bedienungsanleitung.

Potenzielle Infektionsgefahr
Alle Blutzuckermessgeräte sind als potenziell infektiöses Material zu behandeln. Medizinisches Fachpersonal und alle Personen, die dieses System an mehreren Patienten verwenden, müssen die von ihrer Einrichtung vorgeschriebenen Hygienevorschriften befolgen. Alle Produkte oder Gegenstände, die mit menschlichem Blut in Berührung kommen, müssen selbst nach der Reinigung so behandelt werden, als könnten sie infektiöse Erkrankungen übertragen. Benutzer müssen die Empfehlungen zur Verhütung von durch Blut übertragbaren Krankheiten im medizinischen Umfeld, insbesondere die Empfehlungen für potenziell infektiöse menschliche Proben, beachten. Ausführliche Anweisungen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.diabetes.ascensia.com oder wenden Sie sich an den Diabetes Service unter Tel.: 0800 97 212 (BE), Tel.: 800 27 254 (LUX).

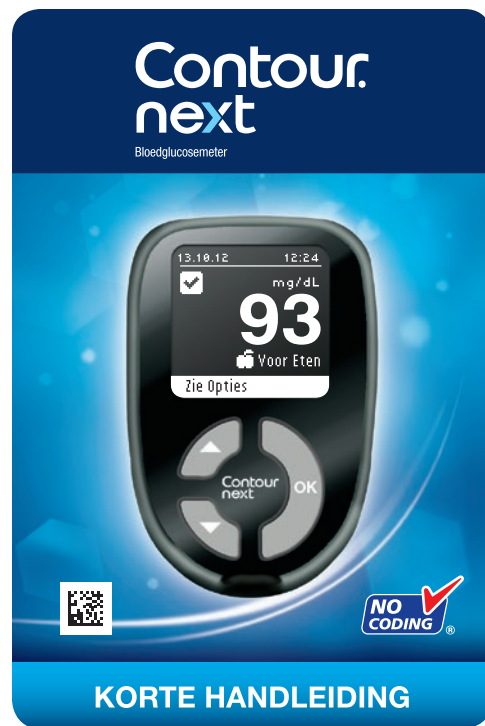

Uw CONTOUR®NEXT Meter



Uw CONTOUR®NEXT teststrip

VOORZICHTIG: Gebruik alleen CONTOUR NEXT teststrips met uw CONTOUR NEXT meter.

De meter aan- en uitzetten

- Houd de **OK**-knop ingedrukt **totdat uw meter aan- of uitgaat**.
- Wanneer een teststrip in de teststrippoort van de meter wordt gestoken, gaat de meter aan.

Knoppen voor omhoog/omlaag/OK

- Met de **▲**- of **▼**-scrollknoppen kunt u één voor één waarden of opties wijzigen. Om te scrollen houdt u de **▲**- of **▼**-knop ingedrukt.
- Druk op de **OK**-knop om de gemarkeerde optie te selecteren.
- Wanneer u het Logboek of Trends wilt verlaten en terug wilt keren naar het Hoofdmenu, drukt u op de **OK**-knop.
- Om Instellingen te verlaten en terug te keren naar het Hoofdmenu scrollt u omlaag naar het **Hoofdmenu** en drukt u op de **OK**-knop.

Zorg ervoor dat u de CONTOUR®NEXT handleiding en de bijsluiter van het prikapparaat leest voor volledige instructies. Bestemd voor in vitro diagnostisch gebruik.

Begininstelling van uw meter

Voordat u uw eerste bloedglucosetest uitvoert, moet u uw meter instellen.



- Houd de **OK**-knop ingedrukt totdat de meter aangaat.



- Druk zonodig op de **▼**-knop om de gewenste taal te markeren. Scroll omlaag om meer talen te zien. Druk op de **OK**-knop om uw keuze te bevestigen.

Dit schermvoorbeeld toont de talen die kunnen worden gekozen. De volgorde van de talen kan per land verschillen.



- Er verschijnt een bericht op uw scherm ter bevestiging van uw taal.

- Druk op de **OK**-knop om de **instelling te voltooien**. Uw meter is nu klaar om uw bloedglucosewaarde te testen.

U kunt ook uw taal, de tijd en de datum wijzigen door naar het **Hoofdmenu** te gaan en **Instelling** te kiezen. Voor instructies kunt u de handleiding raadplegen.

Potentieel biorisico
Alle bloedglucosemeters worden beschouwd als biologisch gevaarlijk. Professionele zorgverleners of personen die dit systeem bij verschillende patiënten gebruiken, moeten de infectiecontroleprocedure volgen die is goedgekeurd door hun instelling. Alle producten of voorwerpen die in aanraking komen met menselijk bloed moeten, zelfs na reiniging, worden behandeld als mogelijke overbrengers van infectieziekten. De gebruiker moet de aanbevelingen voor het voorkomen van door bloed overdraagbare ziekten in de gezondheidszorg opvolgen zoals deze zijn aanbevolen voor potentieel besmettelijk menselijke monsters. Voor volledige instructies kunt u uw handleiding raadplegen.

Voor meer informatie kunt u terecht op www.diabetes.ascensia.com of het gratis nummer van de Klantenservice: Tel. 0800 97 212 (BE), Tel. 800 27 254 (LUX).

Blutzuckermessung


⚠️ ACHTUNG

Waschen Sie bitte Ihre Hände vor und nach einer Messung, dem Anfassen des Messgeräts und der Stechhilfe sowie den Sensoren immer gut mit Wasser und Seife und trocknen Sie sie gut ab.

1. Nehmen Sie die Verschlusskappe von der Stechhilfe ab.



2. Drehen Sie die Schutzkappe einer Lanzette um ¼ Umdrehung (nicht abnehmen).

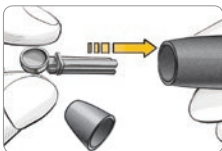

3. Stecken Sie die Lanzette bis zum Anschlag in die Stechhilfe.



4. Drehen Sie die Stechhilfe fest gegen die Einstichstelle und betätigen Sie den Auslöseknopf.



5. Bringen Sie vor der Gewinnung des Blutstropfens die Verschlusskappe wieder an.



6. Stellen Sie die drehbare Verschlusskappe auf die gewünschte Einstichtiefe ein.




7. Führen Sie das graue, eckige Ende des Sensors in die Sensoröffnung ein, bis sich das Messgerät einschaltet.

Beim Einschalten des Messgeräts erscheint die Anzeige **Sensor an Blut führen**. Das Messgerät ist jetzt für die Messung bereit.



8. Drücken Sie die Stechhilfe fest gegen die Einstichstelle und betätigen Sie den Auslöseknopf.

Streichen Sie von der Handfläche zum Finger in Richtung Einstichstelle, um dort einen Blutstropfen zu bilden.

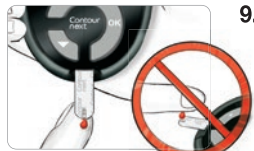

9. Halten Sie die Messöffnung des Sensors sofort an den Blutstropfen.

Wenn der erste Blutstropfen nicht ausreicht, ertönen zwei Signaltöne. Sie haben 30 Sekunden Zeit, um mit demselben Sensor mehr Blut anzusaugen. Befolgen Sie die Anweisungen auf der Messgerätsanzeige.



10. Die Markierungs*-Anzeige erscheint. Wählen Sie die Option **Keine Markierung, Nüchtern, Vor dem Essen oder Nach dem Essen** und drücken Sie dann die **OK**-Taste.

Wenn Ihr Ergebnis über oder unter den eingestellten Zielbereichen liegt, wird Ihr Ergebnis ohne Drücken einer Taste angezeigt.



Nachdem Sie eine Markierung gewählt haben, wird Ihr Messergebnis angezeigt. Damit ist Ihre Messung abgeschlossen und das Messergebnis wurde markiert.

Wenn Ihr Messwert außerhalb Ihres Zielbereichs liegt, wird es mit einem Hinweis eingblendet und die Markierungs-Anzeige erscheint nicht.

11. Um Optionen zum Einstellen einer Erinnerung oder Hinzufügen einer Notiz anzuzeigen, drücken Sie die **OK**-Taste, bevor Sie den Sensor entfernen.

Anweisungen zur Verwendung dieser Optionen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung. Nehmen Sie den Sensor heraus, um das Messgerät auszuschauchen.

* In Ihrem Messgerät ist die Markierungs-Funktion voreingestellt. Weitere Hinweise zur Markierungs-Funktion entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

Ihr Messgerät wurde werksseitig so eingestellt, dass die Ergebnisse in mg/dL angezeigt werden. Falls Ihre Ergebnisse in mmol/L angezeigt werden, wenden Sie sich bitte an den Diabetes Service unter: Tel. 0800 97 212 (BE), Tel. 800 27 254 (LUX).

Uw bloedglucosewaarde meten — Vingertop


⚠️ WAARSCHUWING

Was altijd uw handen goed met water en zeep en droog ze goed voor en na het testen, bij het gebruik van de meter, het prikapparaat of teststrips.

1. Verwijder de puntiedop van het prikapparaat.



2. Maak de ronde beschermddop van een lancet los door deze ¼ slag te draaien, maar verwijder deze dop niet.

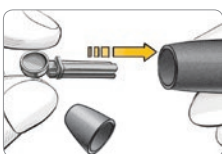


3. Steek het lancet stevig in het prikapparaat totdat deze niet meer verder kan.



4. Draai de ronde lancetbeschermddop eraf.



5. Plaats de puntiedop terug.

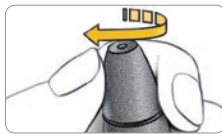

6. Stel de prikdiepte in door aan de puntiedop te draaien totdat de gewenste prikdiepte wordt aangegeven.



7. Steek het grijze, vierkante uiteinde van de teststrip in de teststrippoot om de meter aan te zetten.

De meter gaat aan en op het scherm verschijnt **Bloed aanbrengen**. De meter is nu klaar voor het testen.



8. Druk het prikapparaat stevig tegen de prikplaats en druk op de vrijgaveknop.

Strijk met uw andere hand naar de prikplaats toe zodat er een druppel bloed wordt gevormd.



9. Breng direct hierna de tip van de teststrip in contact met de druppel bloed.

Als de eerste druppel bloed niet genoeg is, zal de meter twee keer een pieptoon geven. U hebt ongeveer 30 seconden om meer bloed op dezelfde strip aan te brengen. Volg de instructies op het meterscherm.



10. Het scherm AutoLog* verschijnt. Selecteer **Geen Markering, Nuchter, Voor Eten of Na Eten**, en druk dan op de **OK**-knop.

Als uw resultaat hoger of lager dan uw ingestelde doelwaarden is, zult u altijd uw resultaat zien zonder op een knop te drukken.



Nadat u uw keuze hebt gemaakt verschijnt op het scherm uw testresultaat. Uw test is nu voltooid en uw testresultaat is vastgelegd.

Als uw testresultaat buiten uw doelwaarden valt, zult u uw resultaat zien met een opmerking en zult u niet het scherm AutoLog zien.

11. Om Opties te zien voor het instellen van een herinnering of het toevoegen van een opmerking drukt u op de **OK**-knop voordat u de teststrip verwijdert.

Raadpleeg de handleiding voor instructies voor het gebruik van Opties. Om uw meter uit te zetten dient u de teststrip te verwijderen.

* Uw meter wordt standaard geleverd met AutoLog ingeschakeld. Raadpleeg uw handleiding voor informatie over de AutoLog-optie. Uw meter is vooraf ingesteld en geblokkeerd zodat resultaten in mg/dL worden getoond. Als uw resultaat in mmol/L staat weergegeven, neem dan contact op met de Klantenservice: Tel. 0800 97 212 (BE), Tel. 800 27 254 (LUX).

VORSICHT:

- Die dem Set beiliegende Stechhilfe ist nicht für die Verwendung durch medizinisches Fachpersonal geeignet. Sie darf aufgrund der potenziellen Infektionsgefahr nur bei einer Person angewendet werden.
- Anweisungen zum Entfernen der Lanzette von der Stechhilfe entnehmen Sie bitte den ausführlichen Anweisungen in der Packungsbeilage zur Stechhilfe.
- Die Abbildungen der Stechhilfe dienen nur zur Veranschaulichung.

Das Hauptmenü

1. **Speicher** wird angezeigt. Durch Drücken der **OK**-Taste gelangen Sie zu den gespeicherten Messwerten.



2. Um alle Ihre Durchschnittswerte und Zusammenfassungen anzuzeigen, drücken Sie die **▼** Taste, bis **Trends** hervorgehoben ist. Drücken Sie anschließend die **OK**-Taste.

3. Um die Messgeräteeinstellungen zu ändern, markieren Sie **Einstellung** und drücken Sie die **OK**-Taste.

VOORZICHTIG:

- Het prikapparaat dat bij uw kit wordt geleverd, is niet geschikt voor gebruik door professionele zorgverleners. Het mag maar bij één persoon worden gebruikt vanwege het risico op infectie.
- Om het lancet uit het prikapparaat te verwijderen, raadpleegt u de gedetailleerde instructies in de bijsluiter.
- De symbolen op het prikapparaat dienen uitsluitend ter illustratie.

Het scherm van het Hoofdmenu

1. **Logboek** zal worden gemarkeerd. Als u uw Logboek wilt inzien, druk dan op de **OK**-knop.



2. Om al uw gemiddelden en samenvattingen te bekijken drukt u op de **▼**-knop om **Trends** te markeren en drukt u vervolgens op de **OK**-knop.

3. Om meterinstellingen te wijzigen of bij te stellen markeert u **Instelling** en drukt u op de **OK**-knop.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.diabetes.ascensia.com oder wenden Sie sich an den Diabetes Service unter: Tel. 0800 97 212 (BE), Tel. 800 27 254 (LUX).



Vertrieb durch:
Ascensia Diabetes Care NV-SA
Pegasuslaan 5
BE-1831 Diegem (Machelen)
Tel. 0800 97 212 (BE)
Tel. 800 27 254 (LUX)
info@ascensiadibetescare.be
www.ascensiadibetescare.be

Ascensia, das „Ascensia Diabetes Care“-Logo, Clinilog, Contour, Glucofacts und das „No Coding“ (Ohne Codieren)-Logo sind Marken und/oder eingetragene Marken von Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

www.patents.ascensia.com



© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Alle Rechte vorbehalten.



90004712
Rev. 09/19

Voor meer informatie kunt u terecht op www.diabetes.ascensia.com of het gratis nummer van de Klantenservice: Tel. 0800 97 212 (BE), Tel. 800 27 254 (LUX).



Gedistribueerd door:
Ascensia Diabetes Care NV-SA
Pegasuslaan 5
BE-1831 Diegem (Machelen)
Tel. 0800 97 212 (BE)
Tel. 800 27 254 (LUX)
info@ascensiadibetescare.be
www.ascensiadibetescare.be

Ascensia, het Ascensia Diabetes Care-logo, Clinilog, Contour, Glucofacts en het No Coding-logo zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

www.patents.ascensia.com



© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG.
Alle rechten voorbehouden.



90004712
Rev. 09/19