


Contour.
Système d'autosurveillance
glycémique XT




Manuel d'utilisation
simplifiée



Votre lecteur CONTOUR®XT

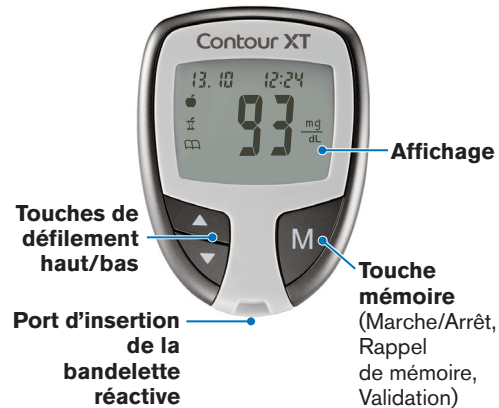


Utilisez uniquement la bandelette réactive CONTOUR®NEXT

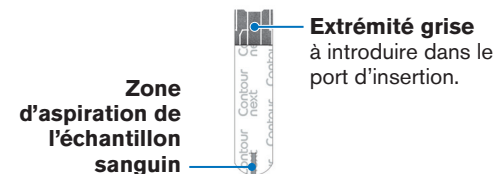


Procédure de test Consultez votre manuel d'utilisation CONTOUR®XT ainsi que la notice de l'autopiqueur pour obtenir des instructions complètes.
⚠ ATTENTION : L'autopiqueur fourni dans le kit est destiné à un usage strictement individuel.

Avant de commencer


1. Lavez-vous et séchez-vous les mains soigneusement.
2. Introduisez l'extrémité grise de la bandelette réactive dans le port d'insertion du lecteur.
3. Le lecteur s'allume. L'image d'une bandelette réactive avec une goutte de sang clignotante apparaît, vous permettant de savoir si le lecteur est prêt pour le test.
4. Retirez l'embase de l'autopiqueur.
5. Tournez le capuchon protecteur de la lancette d'1/4 de tour, sans le retirer.

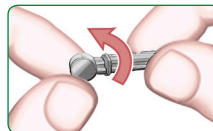

6. Insérez fermement la lancette dans le porte-lancette de l'autopiqueur jusqu'à ce qu'elle soit complètement bloquée.

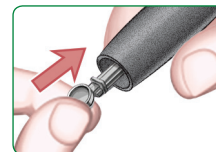

7. Enlevez le capuchon protecteur de la lancette.

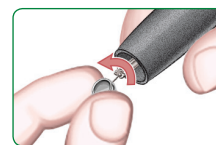

8. Remettez l'embase en place.



9. Réglez la molette de l'embase selon la profondeur de prélèvement désirée.




Prélèvement sanguin

1. Pressez fermement l'autopiqueur contre le site de prélèvement, puis appuyez sur la touche de commande.
2. Massez votre main et votre doigt aux abords du site de prélèvement pour obtenir une goutte de sang.




Réalisation du test de glycémie

1. Utilisez uniquement les bandelettes réactives CONTOUR®NEXT avec le lecteur CONTOUR®XT.
2. Mettez immédiatement l'extrémité de la bandelette réactive en contact avec la goutte de sang. Le sang est aspiré par capillarité.
3. Maintenez l'extrémité de la bandelette réactive dans la goutte de sang jusqu'à ce que le lecteur émette un signal sonore.

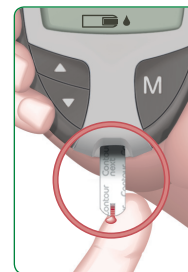

4. Après le signal sonore, le lecteur décompte 5 secondes, puis le résultat de votre test de glycémie s'affiche automatiquement.
5. Retirez la bandelette réactive pour éteindre le lecteur. Jetez la bandelette réactive usagée comme tout autre déchet médical.

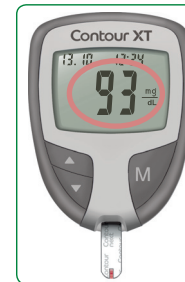

Pour retirer la lancette de l'autopiqueur, consultez les instructions détaillées de la notice de l'autopiqueur.



Les dessins de l'autopiqueur ne servent que d'illustration.

Pour un usage de diagnostic in vitro

Besoin d'aide : Pour plus d'informations, consulter le site : www.diabetes.ascensia.com ou appeler le Service Clientèle Diabetes Care :

0 800 34 22 38 Service & appel gratuits

0800 97 212 (BE), 800 27 254 (LUX)



Risques biologiques potentiels

Tous les systèmes d'autosurveillance glycémique doivent être considérés comme à risque biologique potentiel.

Les professionnels de santé ou les personnes utilisant ce système de surveillance glycémique sur différents patients, doivent respecter les procédures concernant l'hygiène et la prévention des infections, en vigueur dans leur établissement.

Tous les produits ou objets ayant été en contact avec du sang humain doivent être considérés et manipulés comme source potentielle de contamination virale, même après nettoyage.

L'utilisateur doit suivre les recommandations de prévention des maladies transmises par le sang dans les services de soins, telles qu'elles sont établies pour les échantillons humains potentiellement infectieux.

Consultez votre Manuel d'utilisation pour des instructions complètes.

© 2017 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés. Ascensia, le logo Ascensia Diabetes Care, Clinilog, Contour, Glucofacts et le logo « No Coding » (Sans codage) sont des marques commerciales et/ou des marques déposées d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Utilisation du mode Avancé

Paramétrage de votre lecteur en mode Avancé

Pour paramétrer votre lecteur en mode Avancé et bénéficier des marqueurs et autres fonctions disponibles :

1. Appuyez sur **M** pour mettre votre lecteur en marche.
2. Appuyez et maintenez enfoncé ▲ ou ▼ pendant 3 secondes.
3. L-1 clignote.
4. Appuyez sur ▲ ou ▼ pour passer à L-2.
5. Appuyez sur **M** pour valider.









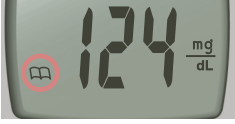

Découvrez comment ces fonctions supplémentaires peuvent vous aider à gérer votre diabète. Contactez le Service Clientèle :


0 800 34 22 38 Service & appel gratuits

0800 97 212 (BE)
800 27 254 (LUX)

www.diabetes.ascensia.com
www.patents.ascensia.com

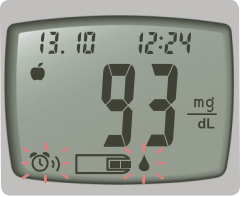


Après avoir réalisé une glycémie, utilisez si nécessaire les marqueurs

POUR MARQUER UN RESULTAT	→ VOUS VERREZ →	POUR REGLER →	VOUS VERREZ →	CELA SIGNIFIE →	UTILISATION DU RAPPEL
Préprandial Marquer une glycémie effectuée avant un repas. Appuyez sur ▲ ou ▼	 (Clignotement)	Appuyez sur M		Le résultat est identifié comme étant une glycémie préprandiale. Appuyez de nouveau sur M pour régler le rappel de glycémie postprandiale.	Lorsque le rappel sonne, le lecteur s'allume et vous visualisez vos résultats de glycémie préprandiale. 
Postprandial Marquer une glycémie effectuée après un repas. Appuyez sur ▲ ou ▼	 (Clignotement)	Appuyez sur M		Le résultat est identifié comme étant une glycémie postprandiale.	Appuyez une fois sur n'importe quelle touche pour arrêter le rappel et deux fois pour éteindre le lecteur.
Journal Identifier toute glycémie comme unique ou différente. Appuyez sur ▲ ou ▼	 (Clignotement)	Appuyez sur M		Le résultat est identifié dans la mémoire comme étant unique ou différent. Vous devez l'annoter dans votre carnet de suivi.	Effectuez une autre glycémie et identifiez-la à l'aide du symbole  marqueur postprandial (voir tableau de gauche).

 Symbole de rappel (pré-réglage à 2 heures) pour réaliser une glycémie postprandiale. Consultez le Manuel d'utilisation pour des instructions complètes.

Codes erreur et symboles

Consultez votre Manuel d'utilisation pour une liste complète des codes erreur.

E1 	Température en dehors des plages acceptées.
E2 	Un problème est survenu au moment de l'aspiration par capillarité du sang. Recommencez le test en utilisant une nouvelle bandelette réactive.
E3 	Le lecteur reconnaît une bandelette réactive usagée ou l'utilisation d'une mauvaise solution de contrôle. Recommencez le test en utilisant une nouvelle bandelette réactive.
E11	Résultats inhabituels. Recommencez le test en utilisant une nouvelle bandelette réactive.



France :
Distribué par :
Ascensia Diabetes Care France SAS
CS20073
20/26 Boulevard du Parc
92521 Neuilly sur Seine CEDEX
France

0 800 34 22 38 Service & appel gratuits
www.ascensia diabetescare.fr
www.diabetes.ascensia.com

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

Belgique :
Distribué par :
Ascensia Diabetes Care NV-SA
Pegasuslaan 5
BE-1831 Diegem (Machelen)
Tél. 0800 97 212 (BE)
Tél. 800 27 254 (LUX)
info@ascensia diabetescare.be
www.ascensia diabetescare.be
www.diabetes.ascensia.com



90004021
Rev. 06/19