



Utilisation avec les bandelettes réactives CONTOUR[®]NEXT uniquement



MANUEL D'UTILISATION SIMPLIFIÉ

VUE DE FACE

Voyant lumineux du port d'insertion de la bandelette réactive

Touche Menu

Écran

Connecteur USB

Port d'insertion de la bandelette réactive

Touches de sélection/défilement

Capuchon de protection USB

Remarque : Vérifier les unités de mesure du lecteur de glycémie. Pour plus d'informations, consulter le Manuel d'utilisation.

VUE DU DESSUS

90004311 Rev. 10/19

Configuration initiale du lecteur de glycémie et connexion à l'appareil Medtronic compatible


Chargement du lecteur de glycémie

- Retirer le capuchon de protection du connecteur USB.** Le lecteur CONTOUR[®]NEXT LINK fonctionne avec une batterie rechargeable permanente. Charger le lecteur de glycémie avec le chargeur mural* ou en branchant le connecteur USB à un ordinateur. S'assurer que l'ordinateur est allumé. Le lecteur de glycémie affiche brièvement à l'écran « Ne pas se tester – En charge » et le port d'insertion de la bandelette réactive clignote. **Ne pas réaliser de test de glycémie pendant que le lecteur de glycémie est en charge.** Lorsque la batterie est rechargée, le voyant lumineux du port d'insertion de la bandelette réactive s'éteint. Déconnecter le lecteur de glycémie CONTOUR NEXT LINK pour réaliser un test de glycémie.



Déconnecter le lecteur de glycémie de la source de charge avant de commencer la configuration

- Pour commencer la configuration, maintenir enfoncée la touche Menu pendant plusieurs secondes jusqu'à ce que le lecteur de glycémie s'allume.
- Faire défiler vers le bas pour sélectionner la langue souhaitée et appuyer sur **OK**.

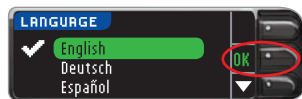

Cet écran montre les langues disponibles. L'ordre des langues peut varier en fonction de votre pays.


Appuyer sur **OK** si la langue en surbrillance est celle souhaitée. Appuyer sur **NON** si la langue affichée n'est pas la langue souhaitée.

- Appuyer sur **OK** pour lancer le processus de connexion. **REMARQUE :** La pompe fait référence à l'appareil Medtronic compatible.
- STOP. N'APPUYER sur AUCUNE touche.** L'écran affiche le numéro d'identification du lecteur de glycémie (dans le coin inférieur gauche). Cet identifiant est nécessaire pour terminer le processus de connexion. Poser le lecteur de glycémie. Prendre l'appareil Medtronic compatible et passer à l'Étape 6.




Connecter le lecteur de glycémie à la pompe à insuline MiniMed Paradigm[®]

- Appuyer sur **ACT** pour aller à **MENU PRINCIPAL**. Faire défiler jusqu'à **Fonctions** à l'aide de la touche bas. Appuyer sur **ACT**.
- Faire défiler jusqu'à **Connecter appareils** et appuyer sur **ACT**. Faire ensuite défiler jusqu'à **Lecteurs** et appuyer sur **ACT**. **Remarque :** si le **MENU FONCTIONS** ne contient pas **Connecter appareils**, faire défiler jusqu'à **Option Lecteur** et appuyer sur **ACT**.
- Sélectionner **Oui** et appuyer sur **ACT**. Pour **changer** de lecteur de glycémie, aller à l'**Étape 9**. Pour **ajouter** un nouveau lecteur de glycémie, aller à l'**Étape 11**.
- Pour remplacer un lecteur de glycémie, sélectionner **Effacer No. ID** et appuyer sur **ACT**.
- Si vous possédez plusieurs identifiants de lecteur de glycémie, répéter l'Étape 9 pour chacun d'entre eux.

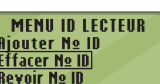


- Pour ajouter un nouveau lecteur, sélectionner **Ajouter No. ID** et appuyer sur **ACT**. Se reporter à l'Étape 5 (ou voir au dos du lecteur de glycémie) pour trouver l'identifiant du lecteur de glycémie. Utiliser les touches de défilement haut et bas pour saisir les six caractères de l'identifiant du lecteur (SN) visibles sur l'écran. Appuyer sur **ACT** après avoir saisi chaque caractère.

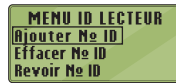

- Sélectionner **Revoir No. ID** sur l'appareil Medtronic compatible pour vérifier que l'identifiant du lecteur CONTOUR[®]NEXT LINK a été saisi correctement. Sinon, revenir à l'Étape 9. **REMARQUE :** Pour plus d'informations, consulter le manuel d'utilisation de l'appareil Medtronic compatible.



- Revenir au lecteur de glycémie CONTOUR NEXT LINK. Après avoir saisi l'identifiant du lecteur de glycémie dans l'appareil Medtronic compatible, appuyer sur **Suivant**.

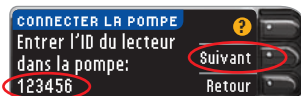

Choix des Options d'envoi du lecteur de glycémie

- OPTIONS D'ENVOI** contrôle la façon dont le lecteur de glycémie enverra les résultats glycémiques à l'appareil Medtronic compatible. Choisir l'**OPTION D'ENVOI** souhaitée. **Toujours** = le lecteur de glycémie enverra toujours les résultats. **Demander** = le lecteur de glycémie posera la question avant d'envoyer les résultats. **Jamais** = le lecteur n'enverra jamais les résultats.





Régler la date et l'heure du lecteur de glycémie pour qu'elles correspondent avec celles de l'appareil Medtronic

- La date et l'heure du **lecteur** doivent correspondre à la date et à l'heure de l'**appareil Medtronic**. Prendre l'appareil Medtronic. Appuyer sur **ACT** pour aller à **MENU PRINCIPAL**. Faire défiler jusqu'à **Fonctions** et appuyer sur **ACT**. Faire défiler jusqu'à **Heure/Date** et appuyer sur la touche **ACT**. Sélectionner le format de l'heure et appuyer sur **ACT**. Entrer l'heure et la date. Revenir au **lecteur**. Suivre les instructions du **lecteur de glycémie** pour que l'heure et la date correspondent à celles de l'**appareil Medtronic**.



Autres paramètres du lecteur de glycémie

- Appuyer sur **Accepter** pour sélectionner **AutoLog désactivé**. **AutoLog** permet de marquer un résultat de test comme **À jeun**, **Avant repas**, **Après repas** ou **Aucun marqueur**. Pour plus d'informations, consulter le manuel d'utilisation.
- Accepter** ou **Modifier** les Alertes haute et basse. Le lecteur de glycémie vous alerte d'un signal sonore lorsque le niveau de glycémie est supérieur ou inférieur à vos niveaux préconfigurés.
- Accepter** ou **Modifier** l'intervalle Cible. L'intervalle Cible est l'objectif défini pour les résultats glycémiques.

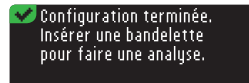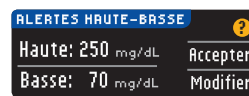

REMARQUE : Les Alertes ne peuvent être configurées qu'en dehors de votre ou de vos intervalles Cibles. Les Cibles ne peuvent être configurées que dans votre ou vos niveaux d'Alerte sélectionnés. Pour plus d'informations, contacter le Service Clientèle. Les coordonnées du Service Clientèle sont disponibles à la page suivante.

LA CONFIGURATION EST MAINTENANT TERMINÉE.

Voir au dos pour consulter les instructions relatives au test de glycémie.

? = Aide

*Le chargeur peut être obtenu séparément auprès du Service Clientèle s'il n'est pas inclus dans le conditionnement du lecteur. Les coordonnées du Service Clientèle sont disponibles à la page suivante.

Matériel nécessaire pour la réalisation du test de glycémie



Bandelettes réactives
CONTOUR®NEXT



Autopiqueur



Lancettes



Lecteur de glycémie
CONTOUR®NEXT LINK




AVERTISSEMENT :

- L'autopiqueur est conçu pour l'autosurveillance d'un seul patient. Il ne doit pas être utilisé sur plus d'une personne en raison du risque d'infection.^{1,2}
 - Utiliser une nouvelle lancette pour chaque test, car les lancettes ne sont plus stériles après utilisation.
 - Toutes les pièces de ce conditionnement sont considérées comme biologiquement dangereuses et peuvent potentiellement transmettre des maladies infectieuses, même après nettoyage.
 - Toujours bien se laver les mains à l'eau savonneuse et les sécher, avant et après un test de glycémie, la manipulation du lecteur de glycémie, de l'autopiqueur ou des bandelettes réactives.
- Pour plus d'informations sur l'entretien du lecteur de glycémie, consulter le manuel d'utilisation.


Réalisation d'un test de glycémie

Prélèvement sanguin

- À partir de n'importe quel écran, insérer la bandelette réactive et attendre l'apparition du message **APPLIQUER LE SANG**.

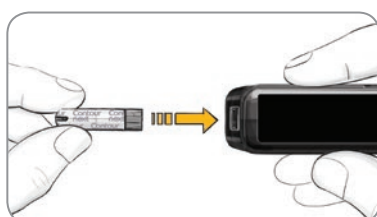


- Retirer l'embase de l'autopiqueur. Insérer fermement la lancette dans l'autopiqueur jusqu'à ce qu'elle soit complètement bloquée.

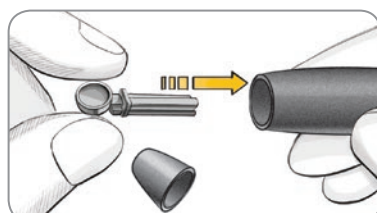

Les dessins représentant l'autopiqueur ne servent que d'illustration. Votre autopiqueur peut avoir un aspect différent. Consulter la notice d'utilisation de votre autopiqueur pour obtenir des instructions détaillées sur son utilisation.

- Replacer l'embase. Tourner la molette de l'embase pour ajuster la profondeur de la piqure.

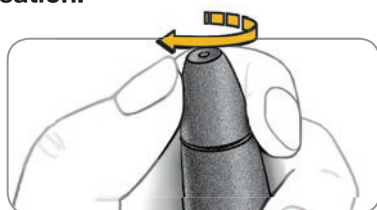

- Prélèvement sanguin.



Réalisation du test de glycémie

- Mettre immédiatement l'extrémité de la bandelette réactive en contact avec la goutte de sang. Si la goutte de sang n'est pas suffisante, le lecteur de glycémie émet deux signaux sonores et affiche à l'écran **QUANTITÉ SANG INSUFFISANTE**. Vous avez environ 30 secondes pour appliquer davantage de sang sur la même bandelette réactive.
- Si AUTOLOG est activé, enregistrer le résultat comme : **à jeun**, **Avant repas**, **Après repas** ou **Aucun marqueur** pour le résultat glycémique.



REMARQUE : Si le résultat glycémique est supérieur à la limite de l'Alerte haute ou inférieur à la limite de l'Alerte basse, il s'affiche automatiquement sans avoir à faire préalablement une sélection AutoLog.

Références

- US Food and Drug Administration. Use of fingerstick devices on more than one person poses risk for transmitting bloodborne pathogens: initial communication. US Department of Health and Human Services; update 11/29/2010. <http://www.fda.gov/MedicalDevices/Safety/AlertsandNotices/ucm224025.htm>
- Centers for Disease Control and Prevention. CDC clinical reminder: use of fingerstick devices on more than one person poses risk for transmitting bloodborne pathogens. US Department of Health and Human Services; 8/23/2010. <http://www.cdc.gov/injectionsafety/Fingerstick-DevicesBGM.html>

Envoi des résultats à l'appareil Medtronic compatible

- Si **Toujours** a été sélectionné dans **Options d'envoi** au moment de la **Configuration**, les résultats seront envoyés directement à la pompe. Si **Demander** a été sélectionné dans **Options d'envoi** au moment de la **Configuration**, il est possible de choisir d'envoyer ou non le résultat à la pompe après chaque test de glycémie. Appuyer sur **Envoi: Oui** ou **Envoi: Non**.



Appuyer sur **OK** pour passer à l'écran suivant.



MISE EN GARDE : Vérifier systématiquement que le résultat glycémique affiché sur la pompe correspond à celui affiché sur le lecteur de glycémie.

Rappel et Remarques

- Sélectionner **Rappel** pour programmer un rappel pour le prochain test de glycémie. Sélectionner **Notes** pour ajouter des informations au résultat. Retirer la bandelette réactive.



Éteindre le lecteur de glycémie

- Retirer la bandelette réactive et le lecteur de glycémie s'éteint après 3 minutes. Ou maintenir enfoncée la touche Menu pour éteindre le lecteur de glycémie.



Pour des instructions complètes, consulter le manuel d'utilisation CONTOUR NEXT LINK, la notice d'utilisation de l'autopiqueur et le manuel d'utilisation de l'appareil Medtronic compatible.

Le Service Clientèle d'Ascensia Diabetes Care France est disponible au 0800 34 22 38 (appel gratuit depuis un poste fixe),

0 800 34 22 38 Service & appel gratuits

Belgique au 0800 97 212, Luxembourg au 800 27 254.
E-mail Belgique et Luxembourg : info@ascensiadibetescare.be
www.ascensiadibetescare.be
www.ascensiadibetescare.fr

Pour obtenir des informations relatives aux brevets et aux licences associées, consulter : www.patents.ascensia.com

IVD Pour un usage de diagnostic in vitro

Ascensia Diabetes Care Holdings AG
Peter Merian-Strasse 90
4052 Basel, Switzerland

ASCENSIA
Diabetes Care

Medtronic

Ascensia, le logo Ascensia Diabetes Care, Clinilog, Contour, Glucofacts et le logo No Coding (Sans codage) sont des marques commerciales et/ou des marques déposées d'Ascensia Diabetes Care Holdings AG.

Bolus Wizard, CareLink, Guardian, MiniMed et Paradigm sont des marques de commerce et/ou des marques déposées de Medtronic MiniMed, Inc.

© 2016 Ascensia Diabetes Care Holdings AG. Tous droits réservés.



2797