



**Contour[®]
next
USB**

Systeme d'autosurveillance
glycemique




**MANUEL D'UTILISATION
SIMPLIFIEE**

Votre lecteur de glycémie CONTOUR[®]NEXT USB

Capuchon de protection USB

Touche Menu principal

Touches de sélection/défilement

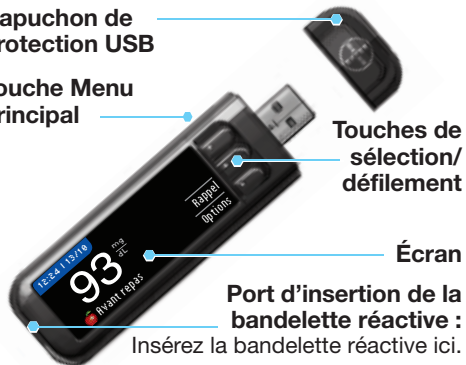

Port d'insertion de la bandelette réactive :
Insérez la bandelette réactive ici.

Utiliser uniquement les bandelettes réactives CONTOUR[®]NEXT de Bayer avec le lecteur de glycémie CONTOUR NEXT USB.

Votre bandelette réactive CONTOUR NEXT

Extrémité grise

À introduire dans le port d'insertion

Zone d'aspiration de la bandelette

Échantillon sanguin aspiré ici



Allumer et éteindre le lecteur de glycémie



- Maintenir enfoncée la touche Menu pour allumer ou éteindre le lecteur de glycémie.
- Insérer ou retirer la bandelette réactive pour allumer ou éteindre le lecteur de glycémie.
- Appuyer sur la touche Menu pour revenir au Menu principal.

Touches de sélection/défilement

- Les touches ▲ ou ▼ vous permettent de naviguer à travers les menus. Vous pouvez maintenir les touches ▲ ou ▼ enfoncées pour accélérer le défilement d'une liste.
- Lorsque votre choix est en surbrillance, le sélectionner en appuyant sur la touche **OK**.

Charger la batterie du lecteur de glycémie

Le lecteur de glycémie CONTOUR[®]NEXT USB est équipé d'une batterie rechargeable. Vous devez charger la batterie du lecteur de glycémie en le connectant à un port USB ou à l'aide du chargeur secteur. Si nécessaire, au bout d'une minute de charge, vous pouvez débrancher le lecteur pour réaliser un seul test de glycémie. La batterie du lecteur de glycémie est intégralement chargée lorsque le voyant du port d'insertion de la bandelette réactive arrête de clignoter et s'éteint.



Vous devez débrancher le lecteur de glycémie CONTOUR NEXT USB pour réaliser le test. Pour plus de détails, consulter le manuel d'utilisation CONTOUR[®]NEXT USB.


Paramétrer le lecteur de glycémie

1. Maintenir enfoncée la touche Menu jusqu'à ce que le lecteur de glycémie s'allume. Après l'écran d'accueil, vous pouvez sélectionner votre langue.
2. Sélectionner la langue souhaitée à l'aide de la touche ▼ et appuyer sur **OK**. Faire défiler la liste pour afficher davantage de choix de langues.



L'image de l'écran du lecteur de glycémie ne sert que d'illustration.


3. Accepter ou Modifier la date et l'heure.

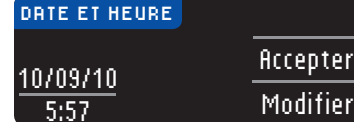

AVERTISSEMENT


Les valeurs des limites haute ou basse et les cibles sont définies par votre professionnel de santé.

4. Accepter ou Modifier les alarmes des limites haute et basse.

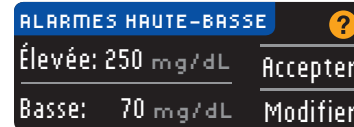


Les alarmes des limites haute ou basse indiquent si les résultats du test se situent au-dessus ou en dessous du paramètre sélectionné. Les alarmes s'affichent en gros caractères orange.


5. Pour modifier l'intervalle cible À jeun, utiliser les touches ▲ ou ▼ et appuyer sur **OK**.

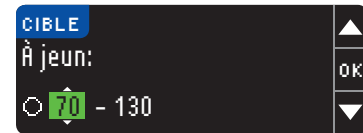


6. Pour modifier l'intervalle cible Avant repas, utiliser les touches ▲ ou ▼ et appuyer sur **OK**.

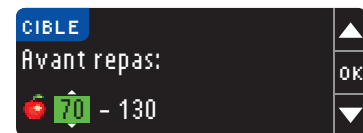

7. Pour modifier l'intervalle cible Après repas, utiliser les touches ▲ ou ▼ et appuyer sur **OK** pour terminer la configuration initiale. Appuyer sur **Accepter** pour terminer la configuration.

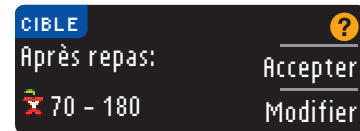

8. Le lecteur de glycémie est maintenant paramétré et prêt pour réaliser le test.

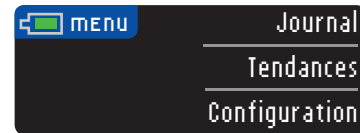

Test de glycémie – Prélèvement capillaire

Pour réaliser le test, vous avez besoin du lecteur de glycémie CONTOUR®NEXT USB chargé, d'une bandelette réactive CONTOUR®NEXT, d'un autopiqueur et d'une lancette.

⚠ AVERTISSEMENT

Se laver systématiquement les mains à l'eau savonneuse et bien les sécher, avant et après le test de glycémie, la manipulation du lecteur de glycémie, de l'autopiqueur ou des bandelettes réactives.

MISE EN GARDE :

- Consulter le manuel d'utilisation CONTOUR®NEXT USB, ainsi que la notice d'utilisation de l'autopiqueur pour obtenir des instructions complètes avant toute utilisation.
- Vous devez paramétrer le lecteur de glycémie avant de réaliser votre premier test de glycémie.

1. Introduire l'extrémité grise de la bandelette réactive dans le port d'insertion du lecteur, jusqu'à l'émission d'un signal sonore.



2. Effectuer un prélèvement sanguin à l'aide de l'autopiqueur.

3. Mettre immédiatement l'extrémité de la bandelette réactive en contact avec la goutte de sang.



Suivre les instructions affichées sur l'écran du lecteur de glycémie.

4. Utiliser la touche ▼ pour mettre en surbrillance **À jeun**, **Avant repas**, **Après repas** ou **Aucun marqueur**, et sélectionner le paramètre souhaité en appuyant sur la touche **OK**.



Le test de glycémie est maintenant terminé et le résultat est identifié.

5. A partir de l'écran de résultat, vous pouvez définir un **Rappel** ou sélectionner des **Options** pour noter des informations sur les glucides, l'insuline ou ajouter des annotations/notes. Se référer au manuel d'utilisation CONTOUR®NEXT USB pour des informations complètes.

6. Pour éteindre le lecteur de glycémie, retirer la bandelette réactive.

Votre lecteur de glycémie est configuré et verrouillé pour afficher les résultats en mg/dL. Si votre résultat est exprimé en mmol/L, contacter le Service Clientèle de Bayer : Belgique au 0800 97 212, France au 0 800 34 22 38 (appel gratuit depuis un poste fixe).

Contactez le Service Clientèle de Bayer : Belgique au 0800 97 212 – www.diabetes.bayer.com, France au 0 800 34 22 38 (appel gratuit depuis un poste fixe) – www.diabetes.bayer.com.



Bayer HealthCare

Distribué par :
Bayer HealthCare S.A.S.
Division Diabetes Care
13 rue Jean Jaurès
92807 Puteaux Cedex
France
Service Clientèle : 0 800 34 22 38
www.diabetes.bayer.com

Distribué par :
Bayer NV-SA
J.E. Mommaertslaan 14
BE-1831 Diegem (Machelen)
Belgique
Tel. 0800 97 212
(appel gratuit depuis un poste fixe)
info@bayerdiabetes.be
www.diabetes.bayer.com

 Bayer Consumer Care AG
Peter Merian-Strasse 84
4052 Basel, Switzerland



Bayer, la croix Bayer, CONTOUR et le logo No Coding sont des marques déposées de Bayer.

84160865

© 2014 Bayer. Tous droits réservés.

Rev. 09/14