


N'oubliez pas : Changez vos lancettes !



NOUVELLE LANCETTE

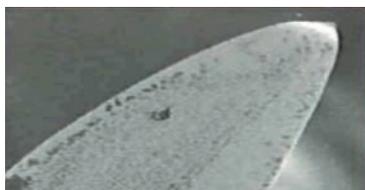

UTILISÉE UNE FOIS



UTILISÉE QUATRE



UTILISÉE DIX FOIS

- Les lancettes réutilisées s'émousent et le prélèvement sanguin devient inutilement douloureux.
- L'endroit où l'aiguille a traversé la peau se guérit plus difficilement si l'aiguille est réutilisée.
- Les lancettes réutilisées forment de petits crochets microscopiques, qui entraînent des déchirures de la peau.
- Après utilisation, les lancettes ne sont plus hygiéniques et peuvent provoquer des inflammations ou des infections.



Utilisez une nouvelle lancette à chaque fois que vous vous piquez ! Les lancettes colorées MICROLET® vous aident à y penser.

Mode d'emploi résumé de votre auto-piqueur MICROLET®



Ascensia Diabetes Care Belgium
Pegasuslaan 5
1831 Diegem
Hotline: 0800 97 212 (BE) 800 27 254 (LUX)
E-mail: info@ascensiadibetescare.be
www.ascensiadibetescare.be

