


Niet vergeten: Lancetten wisselen!

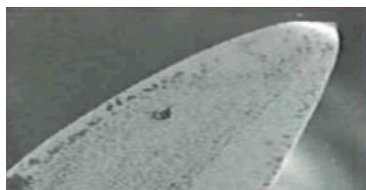

ONGEBRUIKT LANCET



EEN KEER GEBRUIKT



VIER KEER GEBRUIKT




TIEN KEER GEBRUIKT

- Het prikken maakt een lancet bot. Dit veroorzaakt pijn bij het nogmaals gebruiken van hetzelfde lancet.
- Het plekje waar het lancet door de huid is gegaan herstelt slechter als het lancet al vaker gebruikt is.
- Hergebruikte lancetten maken kleine scheurtjes in de huid en beschadigen het weefsel en zenuweinden.
- Na de eerste keer prikken is het lancet niet meer steriel. Bij hergebruik is het risico op ontstekingen en infecties groot.



Gebruik bij iedere keer prikken een nieuw lancet! De vrolijk gekleurde MICROLET® Lancetten helpen u daaraan te denken.

Korte handleiding bij uw MICROLET®NEXT-Prikapparaat:

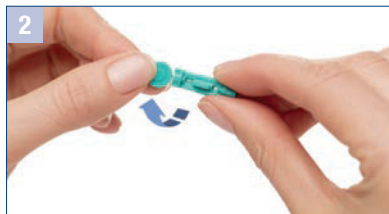

Contour
diabetes solutions

Ascensia Diabetes Care NV
Pegasuslaan 5
1831 Diegem
Hotline : 0800 97 212
E-mail : info@ascensidiabetescare.be
www.ascensidiabetescare.be


ASCENSIA
Diabetes Care